



FIGYELMEZTETÉSEK

WARNINGS · A készülék használata előtt olvassa el

A figyelmeztetések és óvintézkedések **teljes listáját** a készülékhez tartozó Használati útmutatóban találja.

- 1 Epilepszia.** Ne használja az AVE- vagy CES-funkciót, ha epilepsziában vagy fényérzékeny (fotogén) epilepsziában szenved, illetve ha bármilyen jellegű rohama volt már.
- 2 Pszichiátriai előzmény.** Ne használja az AVE- vagy CES-funkciót, ha kórtörténetében pszichiátriai betegség vagy mentális zavar szerepel.
- 3 Pacemaker.** Ne használja a CES-funkciót, ha szívritmus-szabályozója (pacemaker) van. Az elektromos jelek a pacemaker hibás működését okozhatják, ami súlyos sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
- 4 Sérült bőrfelület.** Ne helyezze a CES-fülcsipeszeket vagy elektródákat bőrsérülésre, friss heggre, vágásra, kiütésre vagy leégett bőrfelületre.
- 5 Vezetés és gépkezelés.** Ne használja az AVE- vagy CES-funkciót vezetés vagy bármilyen gép kezelése közben.
- 6 Lítium akkumulátor.** A Premier beépített lítium akkumulátort tartalmaz. Ne kezelje szakszerűtlenül a terméket, és a helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.



A figyelmeztetések az AVE (audio-vizuális stimuláció) és a CES funkciót használó készülékekre vonatkoznak.